

NEW

介護  
保険 貸与

# LOHATES

据置式手すり ロハテス



経済産業省  
製造産業局長賞



Osaka  
products

- 本体重量は約1.8kgと軽量。  
使いたいところまで簡単に持ち運べます。
- グリップ部は肌触りの優しい天然木を使用しています。

あんしんと、  
その先にあるここちよさ。



**マツ六**  
LOHATES(ロハテス)  
ホワイト **貸与**  
019-1550 LH-03WT-R  
1台 **19,500円** (税抜き)  
TAIS 01265-000269




**マツ六**  
LOHATES(ロハテス)  
ブラック **貸与**  
019-1551 LH-03BK-R  
1台 **19,500円** (税抜き)  
TAIS 01265-000270

### 共通仕様

- 材質: 手すり/天然木、フレーム/スチール、  
足部/EPDM
- 重量: 約1.8kg
- 最大使用者体重: 100kg

### ⚠️ ご注意

- ご使用の際は、水平方向に力を  
かけないでください。  
軽量のため、誤った使い方をす  
るとLOHATES自体が倒れて  
しまい、軽傷または物的損害の  
可能性があります。

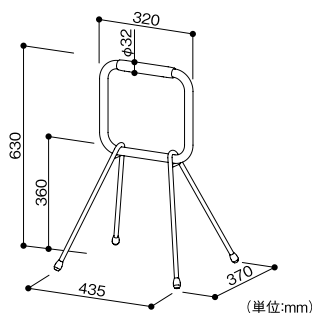

## OPTIONS (オプション)



ブラウン

グレー



ブラウン

グレー

### マツ六 LOHATES用トレー

商品コード	品番	色	価格
019-1504	LH-01T-BN	ブラウン	1個 <b>4,000円</b>
019-1505	LH-01T-GY	グレー	(税抜き)

- 材質: ナイロン ● 耐荷重: 3kg

### マツ六 LOHATES用マガジンラック

商品コード	品番	色	価格
019-1506	LH-01M-BN	ブラウン	1個 <b>4,000円</b>
019-1507	LH-01M-GY	グレー	(税抜き)

- 材質: 綿 ● 耐荷重: 3kg


## HOW TO USE (使い方)

最新情報は  
こちらから




### 椅子からの立ち上がり

- 1 手すりの位置がひざ頭の少し前になる  
ようにLOHATESを置いてください。

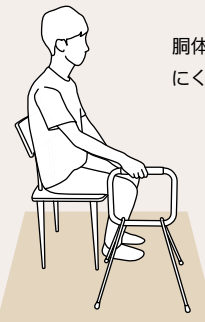

胴体の真横に置くと立ち上がり  
にくいので注意してください。

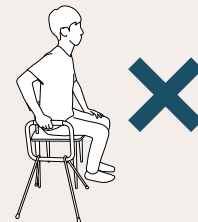


2



足を後方に引き、前傾  
姿勢となった状態で  
LOHATESを下に押し  
ながら立ち上がります。


### 床からの立ち上がり

1

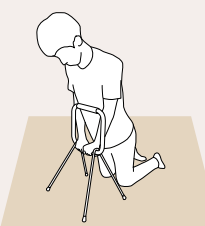

正面にLOHATESを置  
いて、1段目をつかみな  
がら立ち上がりの姿勢  
を整えてください。

2

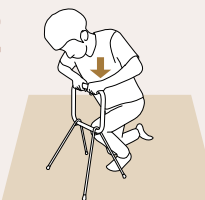

2段目をつかみ、前傾姿  
勢の状態、LOHATES  
を下に押しながら立ち  
上がります。