


ドアの前まで連続手すりを実現する

介護保険 改修

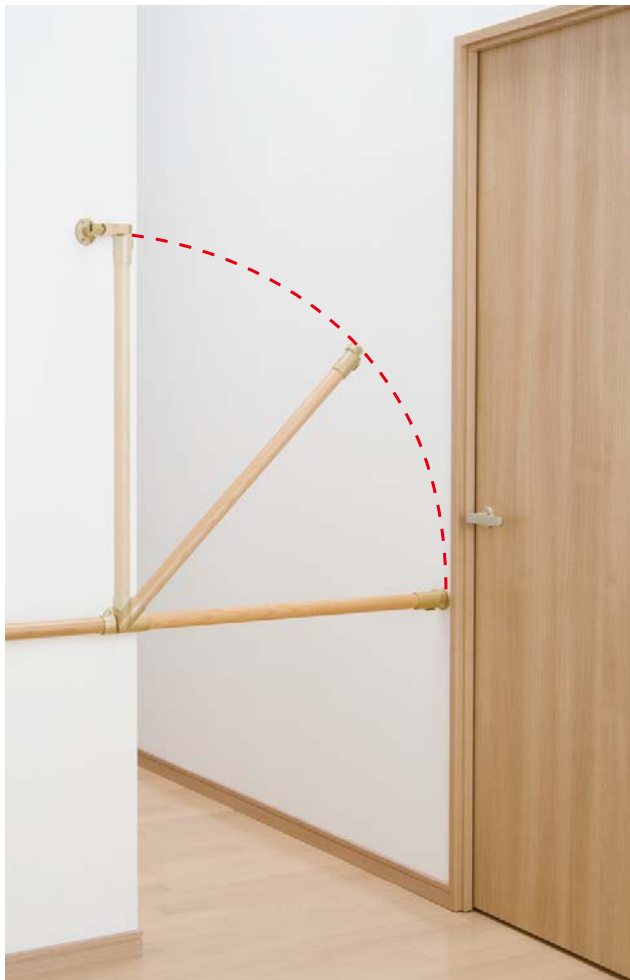

BAUHAUS 遮断機式手すり先端面付ブラケット

- 廊下を横ぎってトイレや居間へ安心して移動することができます。
 - ドアを出て廊下の反対側の手すりまで横断することができます。
 - 軽い力でスムーズに操作できます。
 - φ35・φ32の手すり棒どちらでも使用できます。
 - BAUHAUS 木製手すりシリーズと組み合わせてのご使用を推奨しております。
- ※ 換用脱着手すり棒、ロングスパン1400、35強化コート手すり棒、丸棒手すりとはご使用いただけません。
 (連続させず遮断機の部分のみを使われる場合は、付属のエンドキャップをご使用ください。)
- 本商品のセット明細は左下の部品セット明細の通りです。手すり棒及び連続手すり部材は別途となります。
 - より安全にお使いいただくために、はね上げた際に手すりを固定するキャッチブロック横受けも付属しております。
 - 各種施設でもご使用いただけます。
 - 急に振り下がることのないよう緩衝ストップ機構がついています。
- ※ キャッチプレート・キャッチブロック横受けからはずされた時に手前に引っ張るなどの力がかかると壊れる恐れがありますので絶対にしないでください。



▲ 使用上のご注意


- キャッチブロックに固定した状態(棒を垂直にはね上げた状態)で、縦手すりとしてはご使用になれません。

●ブラケットピッチ

アッシュ丸棒・グロス丸棒 φ35…900mm以内
 アッシュ丸棒・グロス丸棒 φ32…700mm以内

※BAUHAUS以外の手すり棒をご使用の場合は、十分な強度があることを確認してください。また、お使いになる手すり棒の条件(取付けピッチ)をお守りください。

※本図は右勝手です。(単位:mm)

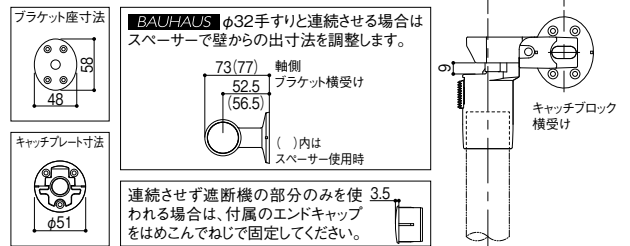


左右兼用

※手すり棒は別売です。

Webで詳細図面をご覧ください。

遮断機式手すり先端面付ブラケット 部品セット明細

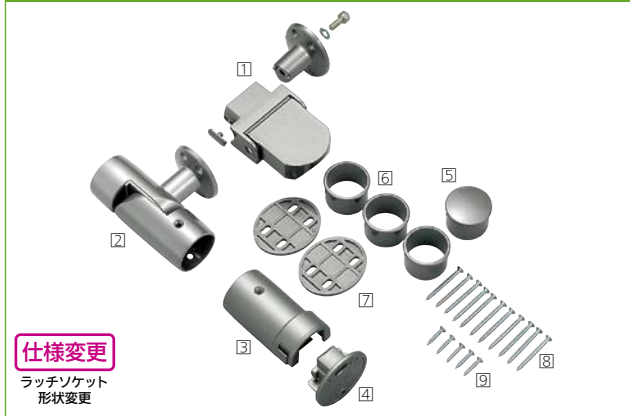

仕様変更
 ラッチソケット
 形状変更

番号	部品名	数量
1	キャッチブロック横受け	1個
1	キャッチブロック横受け(ラッチソケットキャップ)	1個
2	軸側ブラケット横受け	1個
3	ラッチソケット	1個
4	キャッチプレート(φ51)	1個
5	エンドキャップ	1個
6	φ32アダプター	3個
7	スペーサー	2個
8	ブラケット・キャッチプレート取付けねじ⑥丸皿タッピンねじ3.5×40	11本
9	手すり取付けねじ⑥丸皿タッピンねじ3.5×20	5本

マツ六 BAUHAUS 遮断機式手すり先端面付ブラケット 左右兼用

商品コード	色	品番	価格
040-1716	ブラウン	BF-22B	1セット 36,500円(税抜き)
040-1715	ゴールド	BF-22G	
040-1717	シルバー	BF-22S	

●材質:アルミ合金、ABS樹脂、POM樹脂 ●サイズ:φ32、35mm兼用 ※ブラケット(金具)のみのセットです。手すり棒は別途ご用意ください。
 ※キャッチブロック横受けの組立てに六角棒スパナ(呼び5)が必要です。


- 室内用手すり
- 遮断機式手すり
- 最新情報は
 こちらから
-
- バリアフリー
- 手すり
- 屋外用手すり
- 室内用手すり
- トイレ用手すり
- 浴室用手すり
- 据置式手すり
- 手すり以外の商品
- 感染症対策
- 玄関
- 階段・廊下
- トイレ
- 浴室・洗面所
- 寝室・居間
- 屋外
- バリアフリー
- 金物
- 収納・内装
- 建築資材
- 水まわり
- 防犯
- 耐震・防災
- ペット用品
- 接着・テープ・清掃・補修
- 道具・工具
- お役立ちコーナー
- 豆知識
- ご利用方法

施工方法


BAUHAUS 遮断機式手すり先端面付ブラケットの施工

1 左右勝手を確認し、キャッチブロック横受けを組立てます。


取付け勝手
参考図

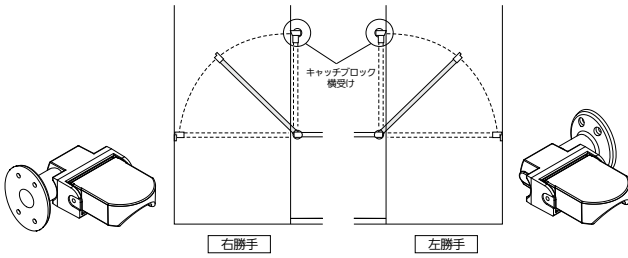

■キャッチブロック横受け
組立て手順

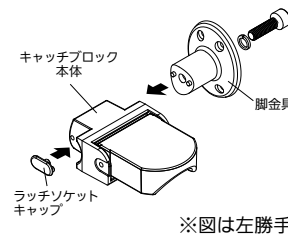

■軸側ブラケット横受け外観図
上下反転することで、左右勝手兼用
できます。

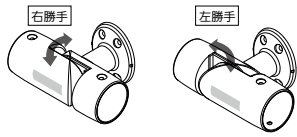


※使用時に手すり棒が急落下しない回転の硬さに設定しています。取付け時に回転させる場合には両側に手すり棒を差込んで回転させてください。

2 手すり棒を取付けます。


■φ35手すり棒を取付ける場合

※図は右勝手

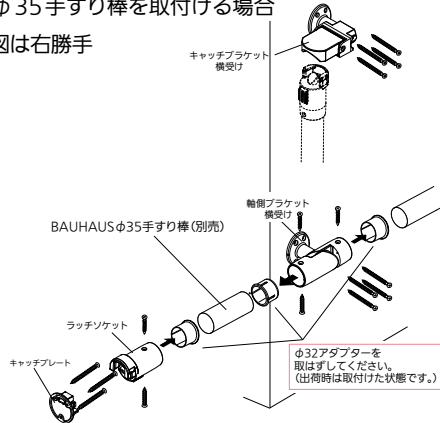


■φ32手すり棒を取付ける場合

- φ32アダプターをはずさないでください。
- 連続手すり側に「BAUHAUS」φ32手すり棒を使用する場合はスペーサーをご使用ください。

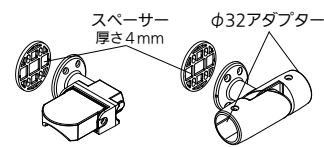


■連続手すりとして使用されない場合

- エンドキャップを取付け、脱落防止のため必ずねじ止めてください。

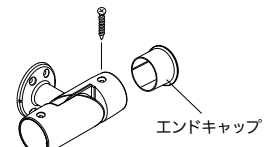

3 軸側ブラケット横受けを取付けます。


扉枠外からブラケットのセンターピッチで25mm以上離してください。
※廊下等の横手すりと連続で使用される場合は、その高さに合わせてください。

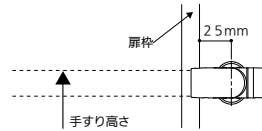


4 手すり棒をカットします。

(手すり棒長さ=ブラケットピッチ-80mm)

カットした後ラッチソケットを差込みます。
ねじ止めはまだしないでください。

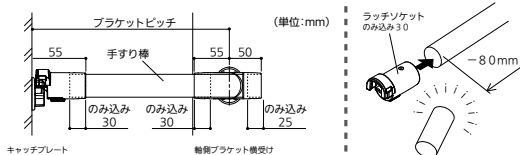

5 カットした手すり棒に、ラッチソケットを
差込み、ねじ止めしてください。

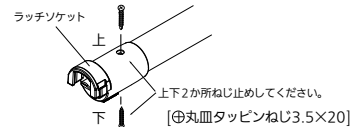


⚠ 施工上のご注意

- 当製品は室内用です。屋外及び浴室には使用できません。
- 木製手すりと連続してご使用される場合は35シリーズ・32シリーズのブラケットのご使用を推奨しております。
- φ35、φ32手すり兼用です。
- ブラケットピッチはφ35の場合900mm以内、φ32の場合700mm以内で取付けてください。
- 「BAUHAUS」以外の手すり棒をご使用の場合は、十分な強度があることを確認してください。また、お使いになる手すり棒の条件(取付けピッチ)をお守りください。
- 下地の無い場合は下地補強をしてください。
- ドアの錠前などが手すりに当たる場合は、壁にベースプレートを取付けて、ブラケットの出寸法を変えてください。
- 軸側ブラケット横受けは、使用時に手すり棒が急落下しない回転の硬さに設定しています。取付け時に回転させる場合には両側に手すり棒を差込んで回転させてください。
- 階段など傾斜部分にはご使用になれません。


⚠ 警告

- 外開き扉部分に使用されますと、閉じ込め事故等が起こる恐れがありますので絶対にしないでください。
- この商品は手すり棒先端のラッチソケットがキャッチプレートに確実にセットされている時に強度が保持されます。キャッチプレートにセットされた時には、毎回確実にセットされていることをご確認ください。
- 手すり棒を垂直にセットした(ラッチソケットをキャッチブロック横受けにセットした)状態で、縦手すりとして使用しないでください。
- 手すり棒を垂直にセットする場合、セットが不十分だと事故や作動不良の原因となりますので手すり棒先端のラッチソケットがキャッチブロック横受けに確実にセットされていることをご確認ください。
- キャッチプレート・キャッチブロック横受けからはずされた時に手前に引っ張るなどの力がかかると壊れる恐れがありますので絶対にしないでください。
- 軸側ブラケット横受けに潤滑剤等を塗布されますと作動不良の原因となりますので絶対にしないでください。

7 キャッチプレートを壁に当てて、手すり棒が水平になる位置で取付けてください。

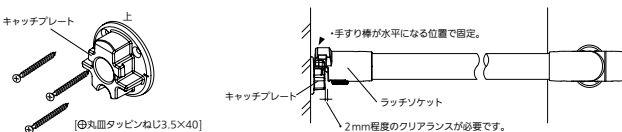

8 キャッチブロック横受けを取付けてください。

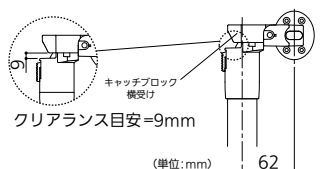

最新情報は
こちらから



バリアフリー

手すり

屋外用手すり

室内用手すり

トイレ用手すり

浴室用手すり

据置式手すり

手すり以外の商品

感染症対策

玄関

階段・廊下

トイレ

浴室・洗面所

寝室・居間

屋外

バリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

ペット用品

接着・テープ・

清掃・補修

道具・工具

お役立ち

コーナー

豆知識

ご利用方法