

高さ調整式踏み台 AF-4+
手すりパイプ AF-5 2本(両側)



TAISコード 01265-000046

高さ調整式踏み台



踏み板の高さ調整が可能で
さまざまな高さの
縁側や出入口に対応できます。

Webで詳細図面を
ご覧頂けます。

- 踏み板の高さを1cmピッチで調整できます。
(1段目10~15cm 2段目10~30cm ※アジャスター高さ30mmを除く)
- 別売の手すりを利用して、片側・両側手すり等必要に応じて設置できます。
- 安全のために壁固定金具をご用意しました。
※壁固定金具を取付けなくても使用可能です。
- レベル調整のためのアジャスター付(30mm程度)
- 組立て式です。

高さ調整式踏み台 AF-4



TAISコード 01265-000044

高さ調整式踏み台 AF-4 +
手すりパイプ AF-5 1本(片側)



TAISコード 01265-000045

⚠ TAISコードを取得しておりますが、福祉用具貸与の給付サービスの対象に該当しない場合があります。詳しくは市町村の担当窓口へご確認ください。

マツ六 高さ調整式踏み台


010-8894 AF-4
1台 86,000円(税抜き)

- サイズ:W704×D561×H340~370mm ●重量:約25kg
- 材質:本体スチール t=2.0 ●仕上げ:焼付塗装
- 付属品:固定用六角穴付きボタネボルト M6×10 32本、ばね座金 M6 φ12 32枚、壁面固定金具(長) 2個、壁面固定金具(短) 2個、壁面固定金具取付けねじ ①トラス小ねじ M5×10 6本、壁面取付けねじ ①トラススタッピンねじ 4×30 4本、壁面取付け用PCプラグ 4個、地面取付けねじ ①トラススタッピンねじ 5×40 4本、地面取付け用PCプラグ 4個、保護クッション穴なし 4個、六角棒スナッチ(呼びF4) 1本、スナッチ(呼び13) 2本

マツ六 高さ調整式踏み台 手すりパイプ

010-8895 AF-5
1本 6,500円(税抜き)


- サイズ:W510×D32×H1000mm ●重量:約3.2kg/本
- 材質:スチール t=2.0 ●仕上げ:粉体塗装
- 付属品:手すりパイプ固定用六角穴付きボタネボルト M6×40 4本、ばね座金 M6 φ12 4枚、保護クッション穴なし 2個、平座金 M6 φ16 4枚

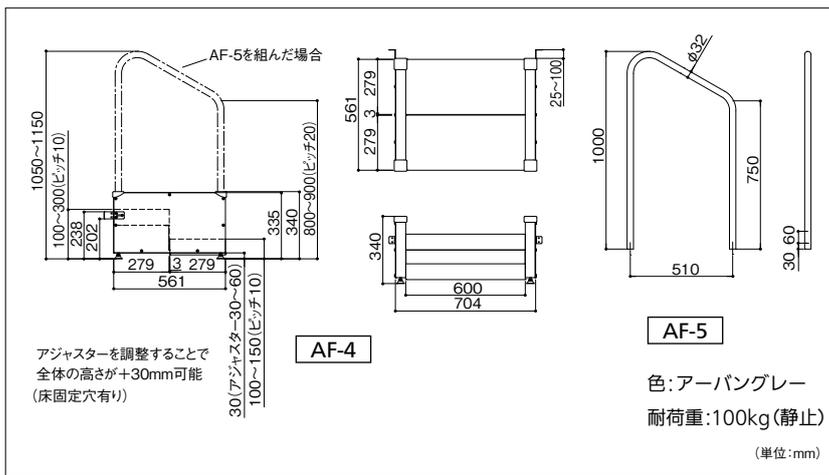

施工方法 高さ調整式踏み台の施工


AF-4

①側板右と左に天板を固定します。※側板を立てて天板を止めます。

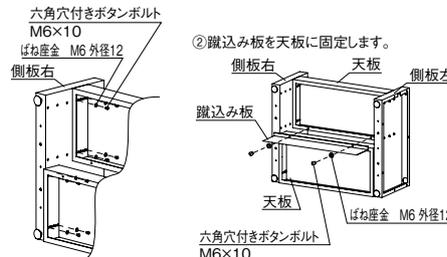

②踏込み板を天板に固定します。


③側板カバーを側板に固定します。

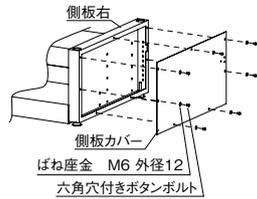

④保護クッション穴なしで手すりパイプ用の穴をふさぎます。側板カバーに壁面固定金具を固定します。




⑤アジャスターで高さ調整をした上で壁及び地面に固定して完了です。

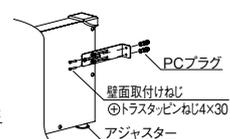


AF-4+AF-5

①と②は AF-4に準じます。

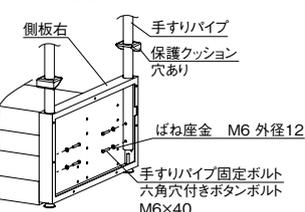


③保護クッション穴ありを通した手すりパイプに側板を固定します。


④側板カバーを側板に固定します。

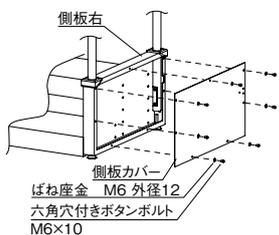

⑤側板カバーに壁面固定金具を固定します。

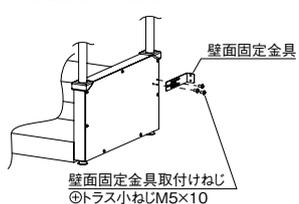

⑥アジャスターで高さ調整をした上で壁及び地面に固定して完了です。

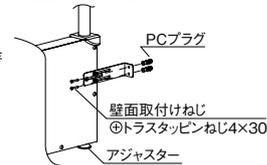

最新情報は
こちらから



バリアフリー

手すり

屋外用手すり

室内用手すり

トイレ用手すり

浴室用手すり

据置式手すり

手すり以外の商品

感染症対策

玄関

階段・廊下

トイレ

浴室・洗面所

寝室・居間

屋外

バリアフリー

金物

収納・内装

建築資材

水まわり

防犯

耐震・防災

ペット用品

接着・テープ・清掃・補修

道具・工具

お役立ちコーナー

豆知識

ご利用方法