

取扱説明書

- この度は「たよレールアップ」をお買い求めいただき、ありがとうございます。
ご使用前にはこの取扱説明書をよく読んで、正しく安全にご使用ください。
- 第三者に譲渡・貸与される場合も、この取扱説明書を必ず添付してください。
- 本製品に関するお問い合わせは、お求めの販売店もしくは弊社にご連絡ください。

たよレールアップ BZO-12

納入業者様へ

設置は納入業者様が行ってください。
P.8『保証規定』に納入業者様名、ご購入日を記入する箇所がありますので、必ずご記入ください。
設置後は、お客様に必ず本書をお渡しください。

お客様へ

この説明書に書かれている注意事項は、必ず守ってください。不適切な使用により事故が発生した場合、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

マークの種類について

- ⚠ 警告 死亡または重傷を負う可能性がある内容
- ⚠ 注意 軽傷または物的損害が発生する可能性がある内容
- 🚫 禁止行為
- ❗ 必ず行う

もくじ


部品明細	1
安全上のご注意	2-3
使用上のご注意	3
設置・使用方法	4-5
取付方法	
・取付前の確認事項	5
・取付方法	6
お手入れ方法	7
点検	7
保管方法	7
廃棄方法	7
保証規定(保証書)	8
基本仕様	8

部品明細

- 取付け・設置前に部品の不足がないかを確認する。


たよレールアップ 本体

【材質】
ジョイント:樹脂
手すり:被膜 半硬質樹脂
芯材 アルミパイプ
ナット(組込み品):ステンレス
【数量】1台

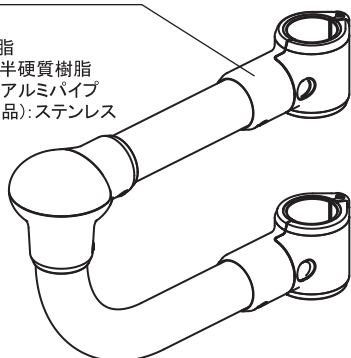


φ32用スペーサー

【材質】樹脂
【数量】4個

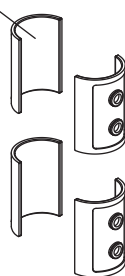

六角穴付きボルト

【材質】ステンレス
【数量】2本

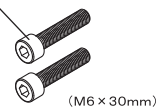

平座金

【材質】ステンレス
【数量】2枚

(呼び径6mm)


安全上のご注意

●取付け前にこの「安全上のご注意」をよく読み、正しく取付けをする。



警告 死亡または重傷を負う可能性がある内容

- ●絶対に指定製品以外や、電動ベッドのサイドバー・介助バーまたは、他社製品と組合せて使用しない。
- 絶対に電動ベッドで使用しない。
- たよレールに取付ける際は、必ずオプション品の『たよレールアーム』または『たよレールアームN』を併用し、たよレール本体をしっかり固定する。また、軽量のベッドに設置する際は安定性を確認する。
- たよレール最下段の横手すりとベッドフレームのすき間は120mm未満、もしくは235mm以上で取付ける。
- たよレールアップの下端とベッドフレームのすき間は60mm未満、もしくは235mm以上で取付ける。また、ベッドフレームや布団・マットレスとのすき間に頭や手足が入り危険な状態にならないよう確認し取付ける。
- ベッドサイドで使用する場合は、ベッドフレームの外側かつ、足側にたよレールアップが位置するように取付ける。ベッドフレームの内側または、頭部側に位置するように取付けない。
- たよレールに取付け、または、わたレールシリーズと併用する際は横手すりとはたよレールアップの角度が90°以上になるように取付け、すき間に頭や手足が入り危険な状態にならないよう確認する。
- たよレールアップを2個使いする場合はたよレールアップ同士の角度が90°以上になるように取付ける。
- わたレールシリーズと併用する場合やたよレールアップを2個使いする場合は、ジョイント同士のすき間は8mm未満、もしくは25mm以上とする。また、わたレールのジョイントは反対向きに取付けない。

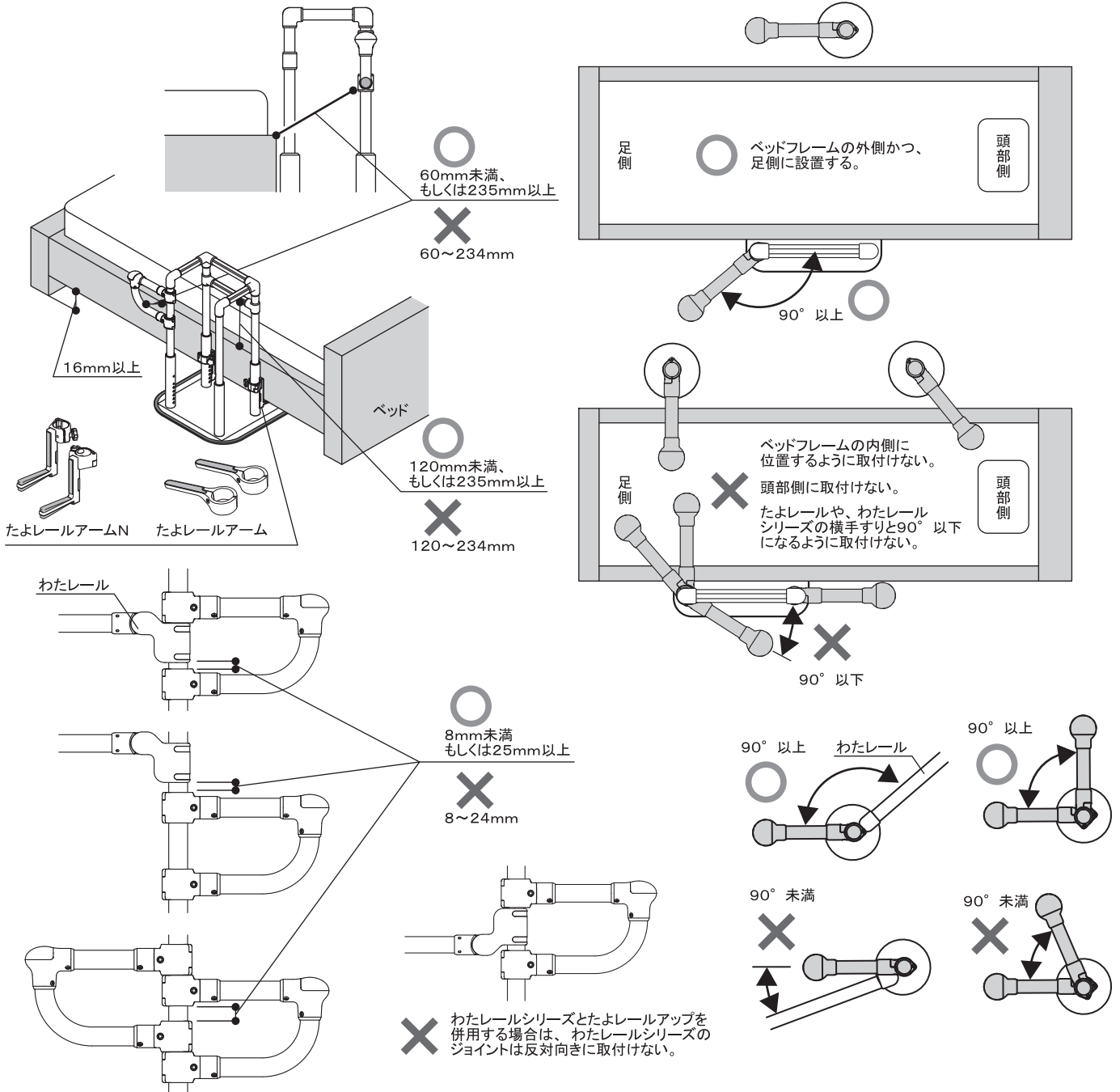


安全上のご注意



注意 軽傷または物的損害が発生する可能性がある内容

- たよレールアップは逆さまに取付けない。
- 浴室・脱衣所・洗面所などで水に濡れる場所には設置しない。
- 屋外や直射日光の当たる場所には設置しない。
- ヒーター(暖房機)等の前には設置しない。
- ねじ等必要な部品を省かない。
- 分解、改造、加工は絶対にしない。
- 海外で使用しない。※本製品は日本国内専用

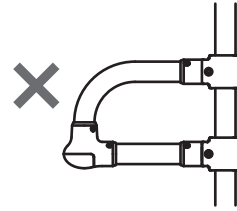

- 取付け、設置、取りはずしは必ず納入業者様で行う。
- 設置後、ガタツキ、ねじの緩みがないことを確認する。
- 使用される方の動線を十分に検討して設置する。
- 手すり高さや位置を使用される方の身体状態に合わせて設置する。

使用上のご注意

- 使用前にこの「使用上のご注意」をよく読み、正しく使用する。



警告 死亡または重傷を負う可能性がある内容

- 予測できない行動をする可能性がある方や自力で危険な状態から回避できない方には使用しない。
 - キャスター付のベッドで使用する際は、ベッドが動かないようにキャスターホルダー等で固定する。
 - 折りたたみベッドで使用する場合は、必ず折りたたみ機構をロックする。
 - 手すりの間に頭や手足を入れない。
- 使用に際しては、使用される方の身体の状態により介助者が付き添うなど、安全には十分に配慮をする。
 - 介助者が必要な場合は必ず付き添う。
 - 介助者が使用される方の状態(安全に使用できる状態にあるか)を確認する。
※使用される方の健康状態や体調が変化した場合は、医師や介護福祉士などの専門員に相談してください。
※ご使用の際は、介助者が付き添って使用されることをお勧めします。




注意 軽傷または物的損害が発生する可能性がある内容

- 動作補助具以外の用途で使用しない。
- 足場にしたり、はしごや椅子として使用しない。
- 子どもの遊具として使用しない。
- 車椅子からの立ち上がりには使用しない。
- 手すりを垂直方向に(上に)引っ張らない。
- 水平方向に力をかけない。
- 手や足または製品が濡れている状態で使用しない。
- 2人以上で同時に使用しない。
- 火気を近づけない。


設置・使用方法

- たよレールアップはプッシュアップを目的とした商品の為、使用推奨部以外を使用すると誤用が発生しやすくなるので注意する。

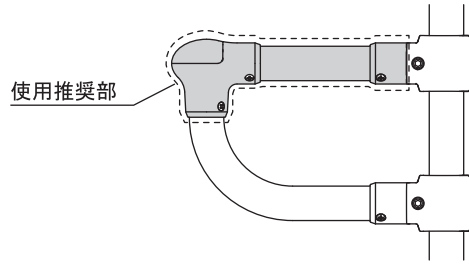

ベッドサイドで使用する場合


- ベッドサイドフレームの外側に取付け、体幹・頭部が前屈できるスペースを作る。たよレールアップは使用側に傾けると両手でプッシュアップがしやすい。

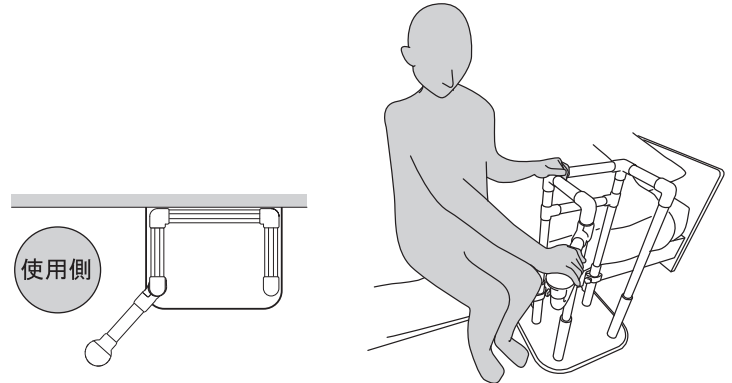

図はBZ-N03+たよレールアームN

椅子からの立ち上がりに使用する場合


- 椅子の斜め前から前方の間で取付け、体幹・頭部が前屈できるスペースを作る。片手または両手でプッシュアップして立ち上がる。

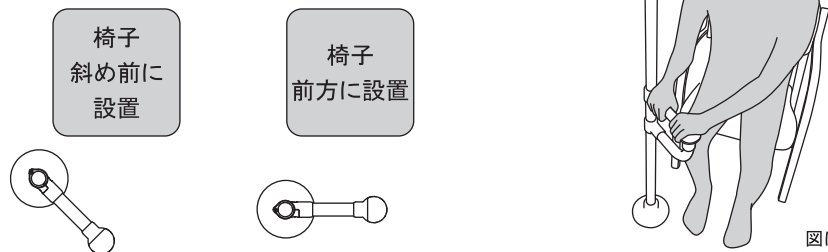

図はBZH-10

床からの立ち上がりに使用する場合

- 体の前方に取付け、体幹・頭部が前屈できるスペースを作る。片手または両手でプッシュアップして立ち上がる。

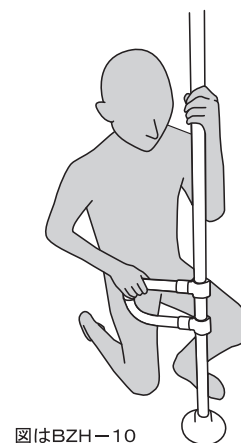



図はBZH-10

設置・使用方法

段差部で使用する場合

【段差下側にたよれールhighを設置する場合】



たよれールアップを段差上側に向くように取付ける。また、たよれールアップは使用側に傾けると動作を制限されにくい。

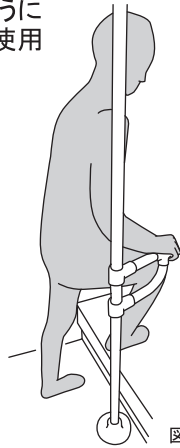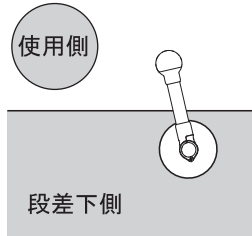

図はBZH-10

【段差上側にたよれールhighを設置する場合】


たよれールアップを段差下側に向くように取付ける。また、たよれールアップは使用側に傾けると動作を制限されにくい。

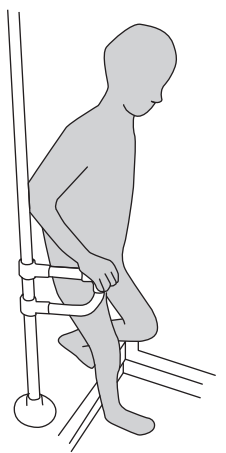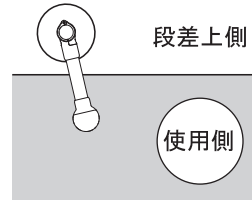

図はBZH-10

取付方法


取付前の確認事項

- 組立に必要な工具を確認する。  六角棒スパナ(呼び5mm)
- 対応たよれールを確認する。
- ⊘ ●絶対に指定製品以外と組合せて使用しない。


たよれールhigh

たよれール


取付可

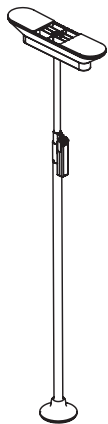


BZH-10/12/13

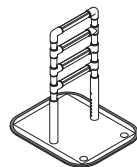


BZ-N01

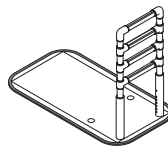


BZ-N02

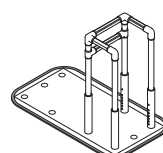


BZ-N03

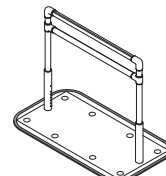


BZ-N04

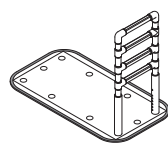

BZ-N05

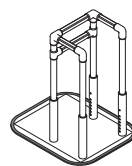


BZ-N06

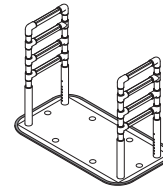

BZ-N07

- たよれール(BZ-N01~07)に取付ける場合は必ず付属の『φ32用スペーサー』を使用する。また、オプション品の『たよれールアーム』または『たよれールアームN』を使用し、ベッドフレームに密着させて設置する。

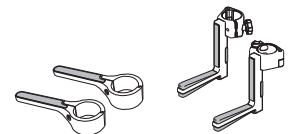

たよれールアーム

たよれールアームN


取付不可

その他、取付可以外のたよれール

取付方法

たよレールhighに取付ける場合

取付け位置を決めて六角穴付きボルト(M6×30mm)と平座金(呼び径6mm)でジョイントを固定する。

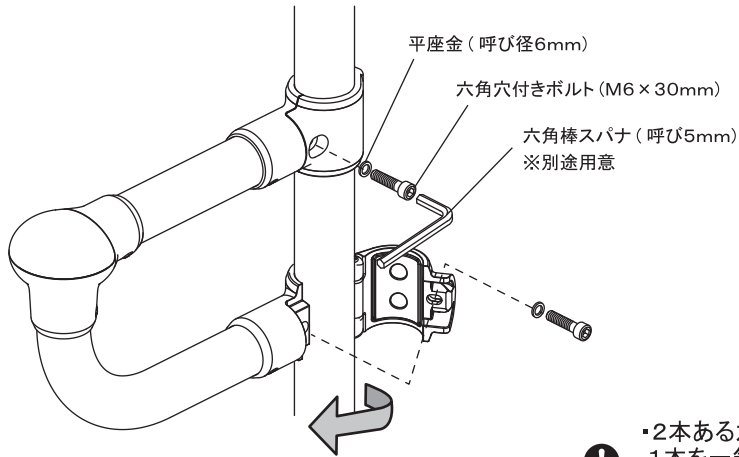


- ! 2本ある六角穴付きボルトは交互に少しずつ締めていく。1本を一気に締め込むとボルトとナットが噛みこむ原因となる。また、取りはずす際も交互に少しずつ緩めて取りはずす。


たよレールに取付ける場合

- ! 必ず付属の『φ32用スペーサー』を使用する。また、オプション品の『たよレールアーム』または『たよレールアームN』を使用し、ベッドフレームに密着させて設置する。

1. φ32用スペーサーを取付ける。

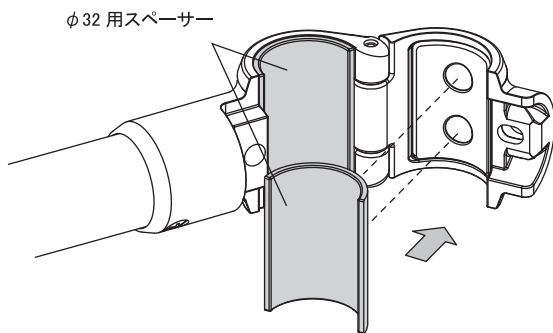

2. 取付け位置を決めて六角穴付きボルト(M6×30mm)と平座金(呼び径6mm)でジョイントを固定する。

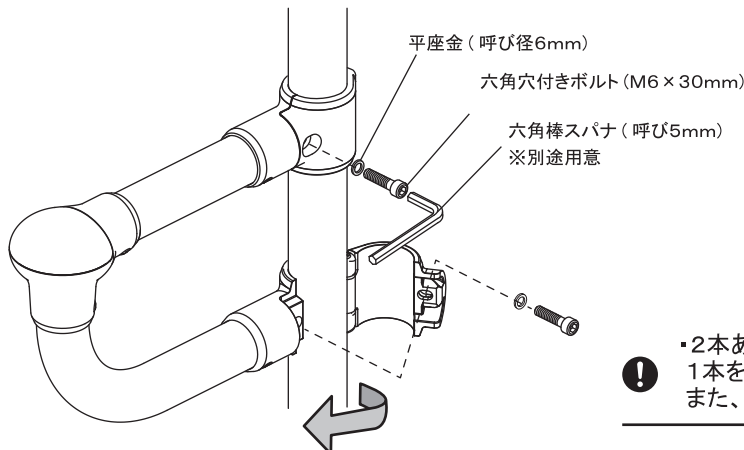

- ! 2本ある六角穴付きボルトは交互に少しずつ締めていく。1本を一気に締め込むとボルトとナットが噛みこむ原因となる。また、取りはずす際も交互に少しずつ緩めて取りはずす。

お手入れ方法

から拭きでのお手入れ

1. やわらかい布でから拭きする。

中性洗剤でのお手入れ

1. 中性洗剤を含ませた柔らかい布で拭きとる。
2. 洗剤が残らないように水拭きする。
3. 最後に柔らかい布で水気を完全に拭きとる。

塩素系洗剤でのお手入れ

※市販の漂白剤(塩素濃度約5%)の場合

1. 塩素系洗剤を濃度0.02%^{注1)}(500mlのペットボトル1本の水に2ml、ペットボトルのキャップ半杯)以下で希釈する。

注1)厚生労働省「社会福祉施設、介護老人保健施設におけるノロウイルスによる感染性胃腸炎の発生・まん延防止策の一層の徹底について」における消毒液の基準に準じる

2. 柔らかい布に含ませた後、固く絞り、洗剤が1か所に溜まらないように注意しながら手早く拭く。

- ⊗ 酸性、アルカリ性洗剤やシンナー、ベンジン等の有機溶剤は使用しない。(変形変色の原因となる。)
- ⊗ クレンザー、磨き粉、ナイロンたわし等は使用しない。(傷の原因となる。)
- ⊗ 浸け置き洗いはしない。(変形変色の原因となる。)

点検

- 定期的に点検を行い、ガタつき、ねじの緩み、破損、その他異常がないかを確認する。

- ! 異常があった場合は直ちに使用を中止し、納入業者へ相談する。

保管方法

- 直射日光が当たらない、乾燥した常温の室内で保管する。変質・変色の原因となる。
- 高温多湿の場所で保管しない。カビの発生および変形の原因となる。

廃棄方法

- 廃棄する場合は、各自治体の廃棄方法に従って廃棄する。

保証規定(保証書)

●保証期間:お買い上げ日より1年

この保証規定は、故障や欠陥が発生した場合に、お買い上げ後1年以内であれば、無償修理または交換をお約束するものです。

ただし下記の場合は、保証期間内においても有償修理となります。

- (1)本書記載以外の使用や禁止行為などに起因するもの。
- (2)火災、地震、水害などの天災地変ならびに事故等外部要因に起因するもの。
- (3)お買い上げ後の落下、輸送による損傷。
- (4)使用による外観や本体外部の消耗および傷。
- (5)リサイクル業者や使用者などによる再販など、当社の責任範囲を超える場合など。
- (6)日本国外での使用。
- (7)当社もしくは当社の指定した修理事業者など以外による修理など。
- (8)本書の提示のない場合。
- (9)組立不備による損傷および不具合。
- (10)納入業者名、ご購入日を明記されていない場合。

納入業者名:

ご購入日: 年 月 日

基本仕様

品名:たよレールアップ(BZO-12)



材質:手すり (被膜)半硬質樹脂
(芯材)アルミパイプ
ジョイント 樹脂
φ32用スペーサー 樹脂

性能:抗菌仕様(手すり部)

原産国:日本

寸法:図参照

※商品改良の為、仕様・デザインなど
断りなく変更することがありますのでご了承ください。

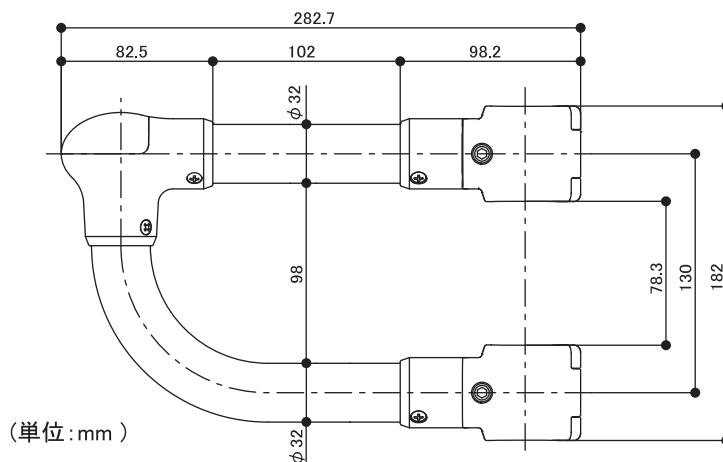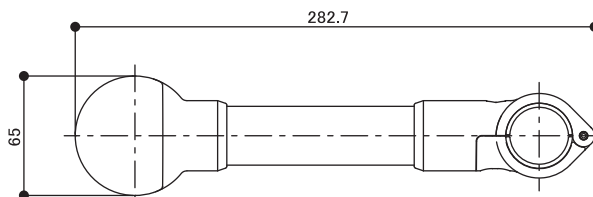

 マツ六株式会社

〒543-0051 大阪市天王寺区四天王寺1丁目5番47号
TEL: 06-6774-2255 FAX: 06-6774-2248
<https://www.mazroc.co.jp/>