
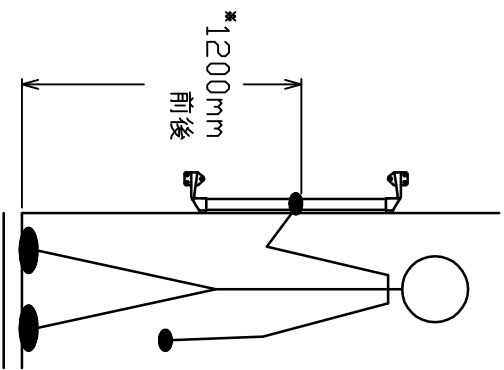



# オフセット手すり取扱い説明書

## オフセット手すり取付の目安

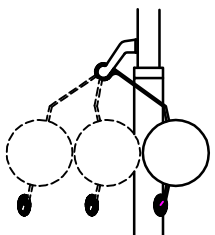


\*1200mmの高さは、平均的な握り位置です。手すりの取付位置は、ご使用に効果的な位置に合わせて取付けてください。

◎浴室、トイレ、勝手口等の出入りに段差のある場所に最適です。  
◎出入り口付近はドアの開閉や出入りの際、体のバランスを崩し易い場所です。オフセット手すりはドアの近くに握り部が位置する形状のため握り易く、しっかりと身体を支えながら出入りすることができます。

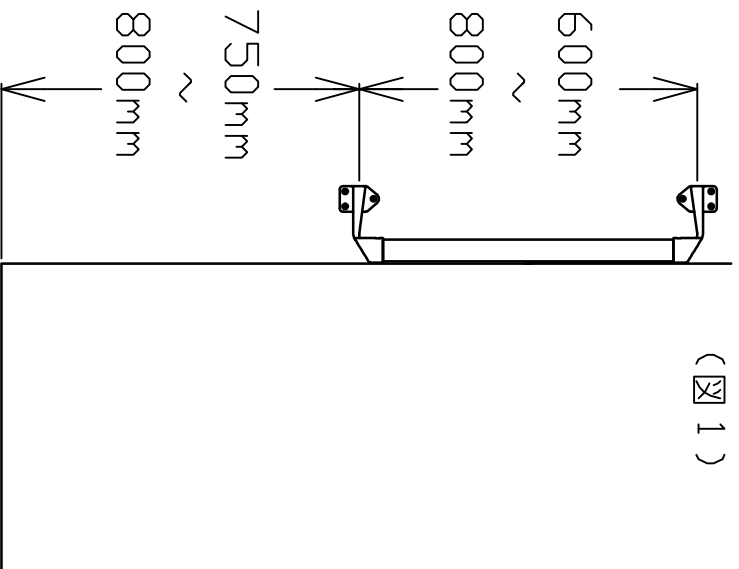

(図1)

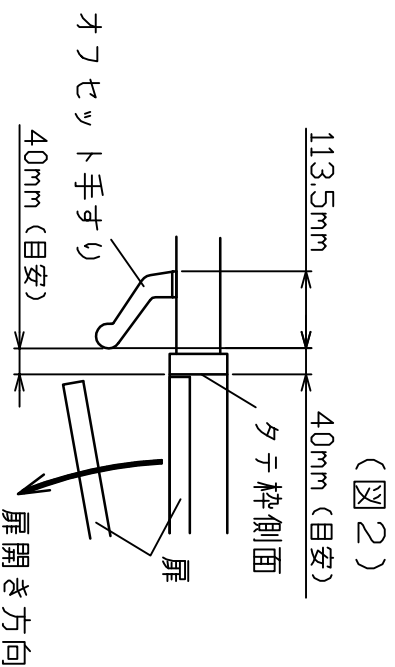

(図2)

注記：手すりを握った手が扉に当たらない様に取付けてください。

◎図1の寸法は、標準的な取付位置です。  
ご使用の状況に合わせて、取付位置を設定してください。  
◎オフセット手すり取付の目安として、出入り口のタテ枠側面より40mm入った位置に手すりが平行となるように取付けてください(図2)。  
◎オフセット手すりがタテ枠側面より出ていますと、ドアに当たったり、出入り口の幅が狭くなりますので、ご注意ください。

### 【ご注意】

- ・手すりにぶら下がったり、足場にしたり、物を引っ掛けたりしないでください。
- 取付ねじの緩みの原因となり、手すり外れなどの事故が発生し、危険です。
- ・オフセット手すりは縦使い専用手すりです。
- 横使いはしないでください。