



折りたたみシャワーベンチ TS/TU取扱説明書

最大使用者体重：100kg以下

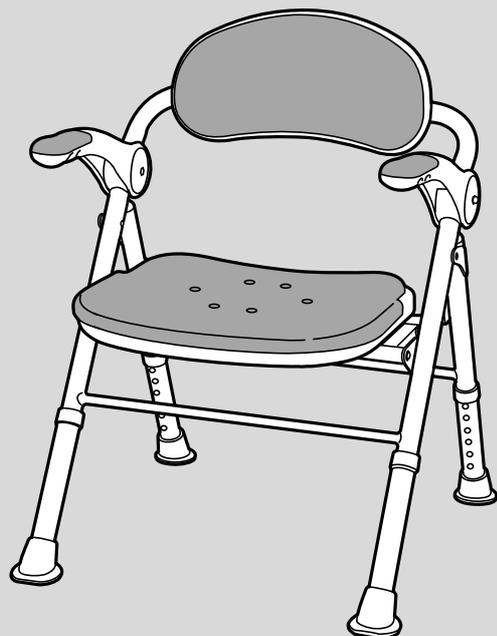

折りたたみシャワーベンチTS

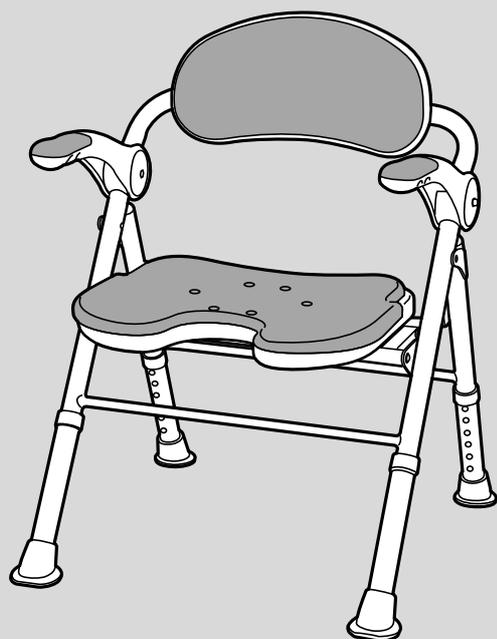

折りたたみシャワーベンチTU

このたびは折りたたみシャワーベンチをお求めいただきまして、まことにありがとうございます。
正しくお使いいただくため、ご使用前に必ずお読みください。
なお、この取扱説明書は大切に保管してください。

もくじ

安全上のご注意	1・2
各部のなまえ	3
使いかた	4・5
お手入れの方法	6

安全上のご注意 必ずお守りください

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他人への危害を未然に防止するためのものです。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



警告

誤った使いかたをすると「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を説明しています。



注意

誤った使いかたをすると「傷害または財産への損害が発生する可能性が想定される」内容を説明しています。

■お守りいただきたい内容の種類を、次の絵表示（図記号）で区分し、説明しています。



必ず実行していただく「強制」内容を説明しています。



してはいけない「禁止」内容を説明しています。



警告

	<p>改造や分解をしないこと 本体機能が正常にはたらかず、けがの原因になります。</p>	<p>ひじ掛けにお尻を乗せて支えにしないこと ひじ掛けが破損したり、転倒し、けがの原因になります。</p>
	<p>必ず強く平坦で安定した場所で使用すること やわらかいマットやすのこ等の段差がある不安定な場所で使用すると転倒し、けがの原因になります。</p>	<p>片側のひじ掛けに手をつく場合、横方向に力をかけて支えたり、体重をかけすぎたりしないこと 転倒し、けがの原因になります。</p>
	<p>座る前に、座面裏のロックがシャフトに確実に固定されているか確認すること 折りたたみ途中の状態で座ると、不意に折りたたまれ、転倒し、けがの原因になります。</p>	<p>本製品を手すり代わりにして身体を支えたり、移動しないこと 転倒し、けがの原因になります。</p>
	<p>4本の脚部は全て同じ高さに設定すること 高さ調節用のプッシュボタンが確実に飛び出して固定されているか必ず確認すること 本体が不安定となり、転倒し、けがの原因になります。</p>	<p>背もたれを支えにして、立ち座りしないこと 転倒し、けがの原因になります。</p>
	<p>本体を踏み台代わりにして、シャフトに足をかけたり、座面やひじ掛けの上に立ったりしないこと 転倒し、けがの原因になります。</p>	<p>上体を後方に大きくのけぞり、背もたれに体重をかけすぎないこと 転倒し、けがの原因になります。</p>
		<p>人が座っている状態で、本体を持って移動させたり、引きずったりしないこと 本体が破損したり、転倒し、けがの原因になります。</p>

安全上のご注意

⚠ 注意

使用者の身体状況によっては、介助者が付き添ったり、お買い上げの販売店やケアマネジャーなど専門家に相談すること

高さの設定などは、お買い上げの販売店やケアマネジャーなど専門家に相談すること

使用前にネジのゆるみなど、各部に異常がないか定期的に点検し使用すること
本体が不安定となり、けがの原因になります。

使用前、使用後は床やベンチについた石鹸やシャンプーを洗い流すこと
足元や座面、ひじ掛けなどがすべりやすくなり、転倒し、けがの原因になります。

ベンチを折りたたんだり、開いたりするときに、手や指をはさまないように十分注意すること
けがをする恐れがあります。

ひじ掛けを上げ下げするときに、手や指をはさまないように十分注意すること
けがをする恐れがあります。



ソフトパッドがしっかり固定されているか確認すること
転倒し、けがの原因になります。


折りたたんだ状態で保管するとき、平坦で安定する場所に置くこと
本体が転倒し、けがの原因になります。

体重が100kgを超える方は使用しないこと
本体が破損し、けがをする恐れがあります。


浴室内で使用するシャワーベンチ以外の用途で使用しないこと

子供を遊ばせたりしないこと

ベンチを浴槽の中など水の中に沈めて使用しないこと
パイプが腐食により破損したり、設置が不安定となり、けがの原因になります。

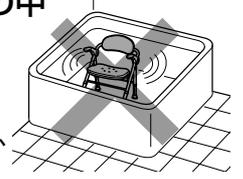

折りたたんだ状態で横にして保管するとき、本体の上に重いものをのせたりしないこと
本体が変形したり、破損する恐れがあります。

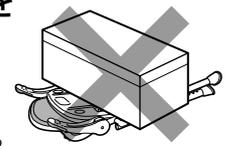

脚ゴム（ゴムキャップ）が外れたまま使用しないこと
転倒し、けがの原因になります。また、床に傷が付く原因になります。

塩ビ製フロアマット（床）の上に長期間放置しないこと
フロアマットや脚ゴム（ゴムキャップ）が劣化及び変色する恐れがあります。

戸外に放置したり、直射日光に当てたりしないこと
劣化および変色の原因になります。


ストーブなどの火気に近づけないこと
火災や変形、変色の原因になります。

塩素系薬剤をかけての殺菌・消毒及び温泉水や硫黄系の入浴剤をかけての使用は行わないこと

パイプが腐食により破損し、けがの原因になります。


お手入れの際は、タワシや磨き粉、研磨剤入りのスポンジ等は使用しないこと
塩素系洗剤、酸・アルカリ性洗剤、シンナー、クレゾール等は絶対に使用しないこと

製品が劣化または破損し、けがの原因になります。

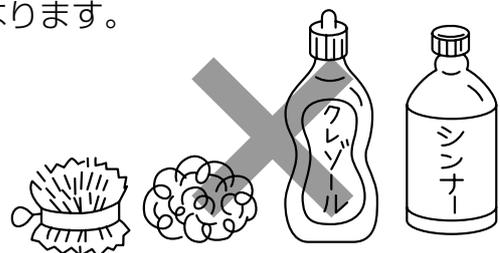


各部のなまえ

折りたたみシャワーベンチ TS

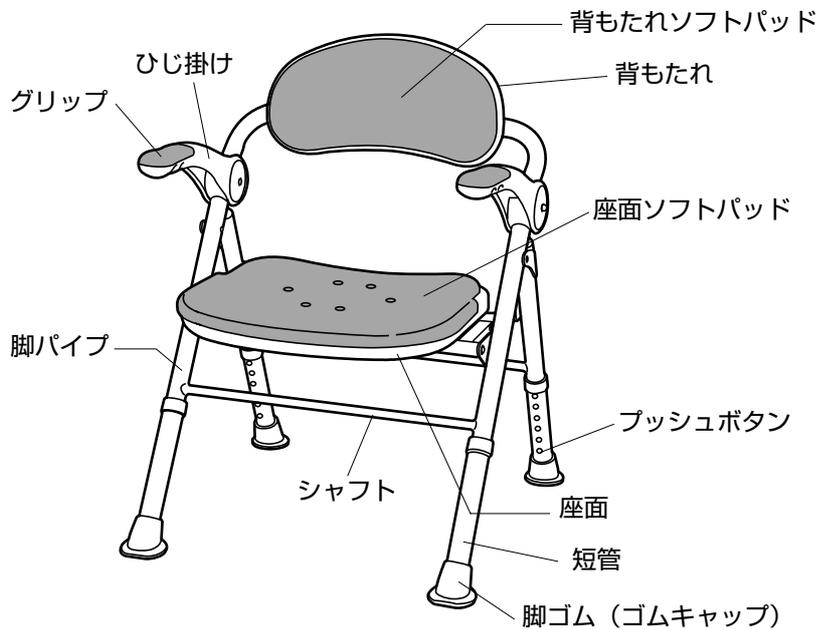


折りたたみシャワーベンチ TU

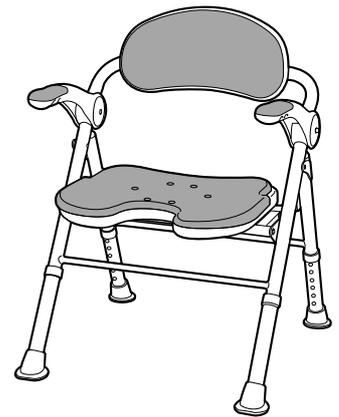

仕様

構成部材	部品名	材質
	座面・背もたれ	ポリエチレン
	ひじ掛け	ポリプロピレン
	グリップ	エラストマー
	ソフトパッド (座・背もたれ)	EVA
	脚パイプ・短管	アルミニウム
	金属部品	ステンレス・アルミニウム・黄銅
	脚ゴム (ゴムキャップ)	合成ゴム
サイズ	幅52×奥行50×高さ67~77cm	
重量	(TS)約5kg / (TU)約4.8kg	
座面までの高さ	35~45cm (6段階 / 2cmピッチ)	

■サイズ (単位はcm)

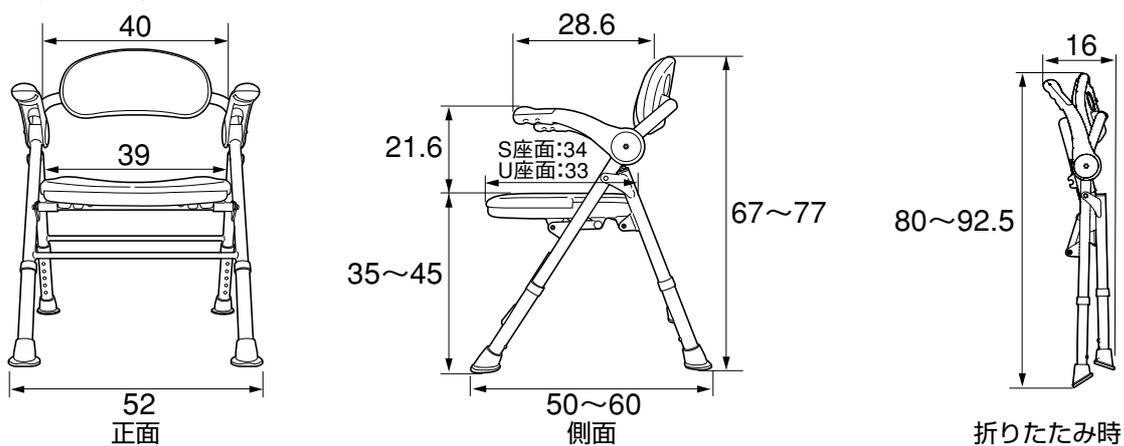

使いかた

本体を開いたり、折りたたんだりするときは下記の事項に注意して行ってください。



座る前に、座面裏のロックがシャフトに確実に固定されているか確認すること
転倒し、けがの原因になります。




ベンチを折りたたんだり、開いたりするときに、手や指をはさまないように十分注意すること
けがをする恐れがあります。



ひじ掛けを上げ下げするときに、手や指をはさまないように十分注意すること
けがをする恐れがあります。


開きかた

- ①座面を手前に倒し、座面を上から押して「カチッ」と音がすればセット完了です。
- ②必要に応じてひじ掛けを水平になるまでおろします。

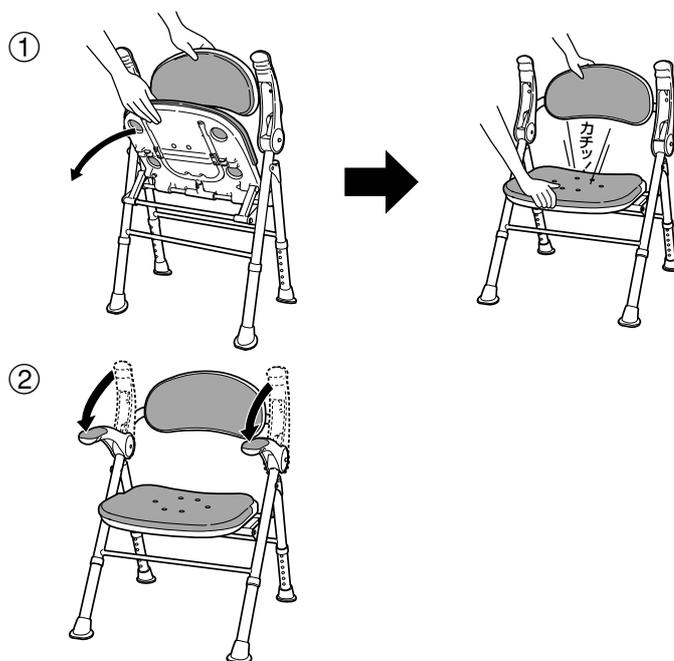

折りたたみかた

- ①座面を上引き上げればロックが外れ折りたたみができます。
- ②ひじ掛けを上跳ね上げます。

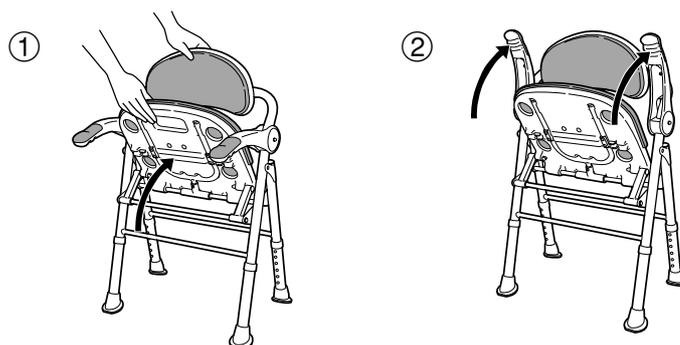

使いかた


座面の高さ調節方法

座面の高さは6段階（約35～45cm）に調節できます。（2cmピッチ）

調節は、脚部にあるプッシュボタンを押しながら短管を上下に動かし、設定したい高さの穴に合わせてください。プッシュボタンが短管の穴から確実に飛び出せばセット完了です。

※高さ調節の目安（高さ表示番号と座面高さ）

高さ表示番号	1	2	3	4	5	6
座面高さ	35cm	37cm	39cm	41cm	43cm	45cm

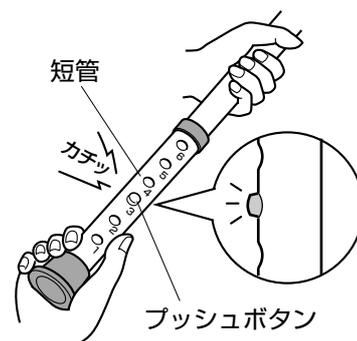

警告 4本の脚部は全て同じ高さに設定すること
高さ調節用のプッシュボタンが確実に飛び出して固定されているか必ず確認すること
本体が不安定となり、転倒し、けがの原因になります。

※長期間使用していると、高さ調節用のプッシュボタンのまわりに石鹸などが付着し動かなくなることがありますので、定期的に汚れを落とし、プッシュボタンが作動するか確認してください。

ひじ掛けの使用法


本体左右のひじ掛けは、必要に応じて上げ下げできます。

ひじ掛けを下ろした状態

立ち座りのときに身体を支える補助として使用したり、着座したときに身体を安定させたいときに使用します。

ひじ掛けを上げた状態

ひじ掛けを上げることで、座ったままで身体の向きを変えることができます。
狭いスペースでの移動をスムーズに行ったり、座った状態で浴槽へ移乗するときに便利です。

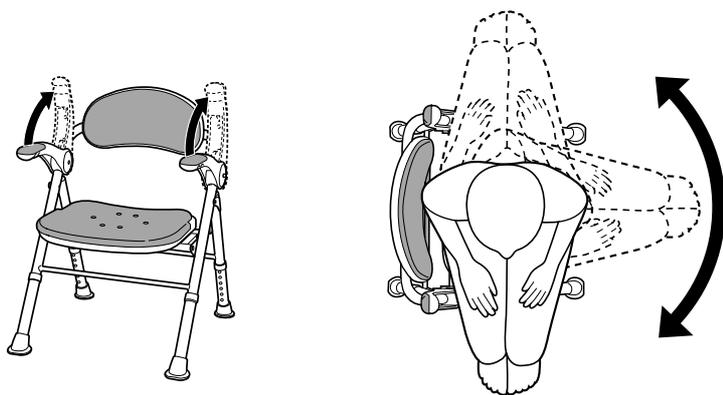

警告 片側のひじ掛けに手をつく場合、横方向に力をかけて支えたり、
体重をかけすぎたりしないこと
転倒し、けがの原因になります。



注意 ひじ掛けを上げ下げするときに、手や指をはさまないように十分注意すること
けがををする恐れがあります。

お手入れの方法

ソフトパッドの着脱方法

座面・背もたれソフトパッドの取り外し

座面・背もたれの裏面からソフトパッドを押すと、取り外すことができます。

座面・背もたれソフトパッドの取り付け

ソフトパッド裏面の凸部をそれぞれ座面・背もたれの穴に合わせ、上からしっかり押さえるだけで取り付けることができます。



ソフトパッドがしっかり固定されているか確認すること
転倒し、けがの原因になります。

本体及びソフトパッドの洗浄方法

中性洗剤のうすめ液をスポンジかやわらかい布に含ませ汚れを取ったあと、きれいな水で洗剤を洗い流し、かげ干しか、乾いた布で空ぶきしてください。



タワシや磨き粉、研磨剤入りのスポンジ等は使用しないこと
塩素系洗剤、酸・アルカリ性洗剤、シンナー、クレゾール等は絶対に使用しないこと
製品が劣化または破損し、けがの原因になります。

座面・背もたれソフトパッド・脚ゴム（ゴムキャップ）は消耗品ですので、汚れたり、破損した場合はお買い求めになった販売店にお問い合わせの上、ご購入ください。

●製品の仕様および価格は、予告なく変更する場合があります。

製品に関するご意見・お問い合わせは

お客様相談室

フリーダイヤル ☎0120-86-7735

（受付時間）祝祭日以外の月～金 9:00～17:00
（12:00～13:00はのぞく）



アロン化成株式会社

ライフサポート事業部

〒141-0022 東京都品川区東五反田1-22-1 五反田ANビル4階 TEL(03)5420-1556
FAX(03)5420-7750

東京営業グループ ☎(03)5420-1562

仙台支店 ☎(022)291-5477

大阪支店 ☎(06)6448-5127

広島支店 ☎(082)245-7100

名古屋支店 ☎(052)203-0396

札幌営業所 ☎(011)709-6011

福岡支店 ☎(092)741-1411