



あんじゅ 安寿


大切にしたい。
自立への気持ちと思いやり。

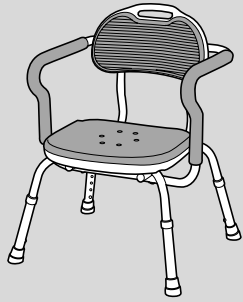


ひじ掛け付シャワーベンチRE-S/RE-Sワイド

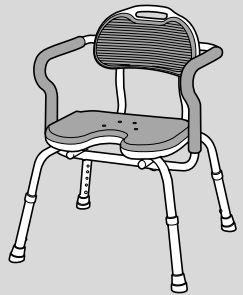

ひじ掛け付シャワーベンチRE-U/RE-Uワイド

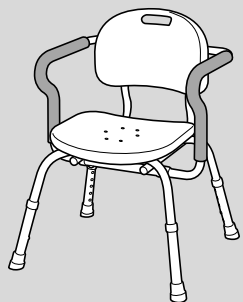

ひじ掛け付シャワーベンチRN-S

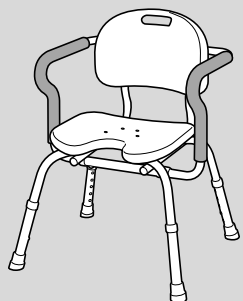

ひじ掛け付シャワーベンチRN-U

ひじ掛け付シャワーベンチ RE-S/RE-U RE-Sワイド RE-Uワイド RN-S/RN-U 取扱説明書



このたびはひじ掛け付シャワーベンチシリーズをお求めいただきまして、まことにありがとうございます。
正しくお使いいただくため、ご使用前に必ずお読みください。

もくじ

安全上のご注意	1・2
各部のなまえ	3
使いかた	4・5
お手入れの方法	5




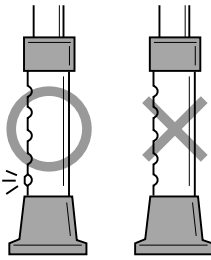





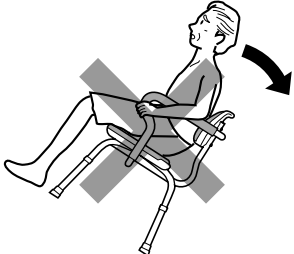
安全上のご注意 (必ずお守りください)

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他人への危害を未然に防止するためのものです。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

	警告 誤った使いかたをすると「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を説明しています。
	注意 誤った使いかたをすると「傷害または財産への損害が発生する可能性が想定される」内容を説明しています。

■お守りいただきたい内容の種類を、次の絵表示 (図記号) で区分し、説明しています。(下記は絵表示の例です)


	必ず実行していただく「強制」内容を説明しています。
	してはいけない「禁止」内容を説明しています。

 注意	
 <p>改造や分解をしないこと 本体が正常にはたらかず、けがの原因になります。</p> 	<p>フィッティング (高さの設定など) は、お買い上げの販売店かケアマネージャーなど専門家に相談すること</p>
<p>使用前にネジのゆるみなど各部に異常がないか定期的に点検し、使用すること けがの原因になります。</p> 	 <p>使用者の身体状況によっては、介助者が付き添ったり、お買い上げの販売店かケアマネージャーなど専門家に相談すること</p>
 <p>必ず硬く平たんで安定した場所で使用すること やわらかいマットやすのこ等の段差がある不安定な場所で使用すると転倒し、けがの原因になります。</p>	<p>使用前、使用後は床やベンチについた石鹸やシャンプーを洗い流すこと すべりやすくなり、転倒し、けがの原因になります。</p> 
<p>使用者が自分の身体を十分に安定させられない場合は、必ず介助者が付き添うこと</p> 	 <p>上体を後方に大きくのけぞり、背もたれに体重をかけすぎないこと 転倒し、けがの原因になります。</p> 

安全上のご注意

注意

ベンチに座る時や一人で立ち上がる時、ひじ掛けに体重をかけすぎたり、片側だけに手をつけて、横方向に力をかけて支えにしないこと
転倒し、けがの原因になります。

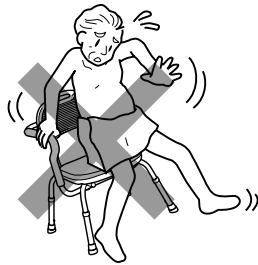

背もたれを支えにしての移動や立ち上がりを行わないこと
転倒し、けがの原因になります。



ゴムキャップが外れたまま使用しないこと
転倒し、けがの原因になります。また、床にキズがつく原因になります。

故意にゆすらないこと
本体が転倒し、けがの原因になります。

人が座っている状態で本体を持って移動させないこと
本体が破損し、けがの原因になります。

浴室内で使用するシャワーベンチ以外の用途で使用しないこと
子供を遊ばせないこと



体重が100kg以上の方は使用しないこと
本体が破損する原因になります。

ベンチを浴槽の中などの水の中に沈めて使用しないこと
パイプが腐食により破損したり、不安定となり、けがの原因になります。

塩素系薬剤をかけたの殺菌・消毒および、温泉水や、硫黄系の入浴剤をかけたの使用は行わないこと
パイプが腐食により破損し、けがの原因になります。

戸外に放置したり、直射日光に当てたりしないこと
劣化および変色の原因になります。

ストーブなどの火気に近づけないこと
火災や変形、変色の原因になります。


塩ビ製フロアマット（床）の上に長期間放置しないこと
フロアマットやゴムキャップが劣化および変色の原因になります。

タワシや磨き粉、研磨剤入りのスポンジ等は使用しないこと
塩素系洗剤・酸・アルカリ性洗剤・シンナー・クレゾール等は絶対に使用しないこと
プラスチックが劣化または破損し、けがの原因になります。




各部のなまえ


ひじ掛け付シャワーベンチRE-S/RE-Sワイド

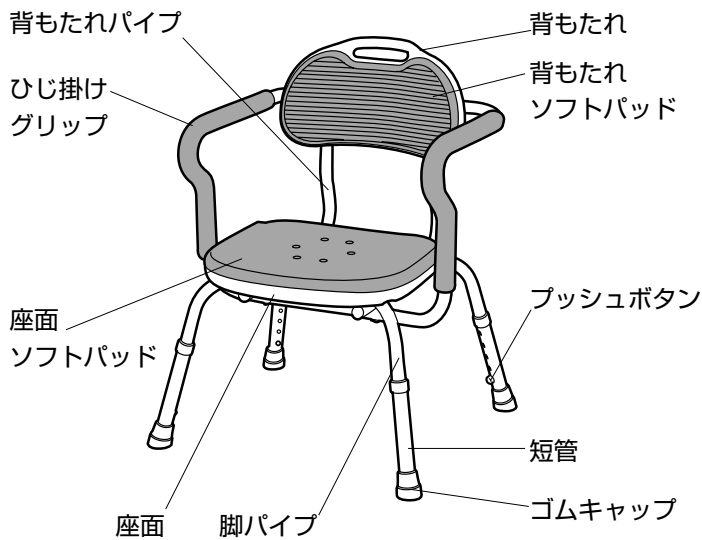


ひじ掛け付シャワーベンチRN-S

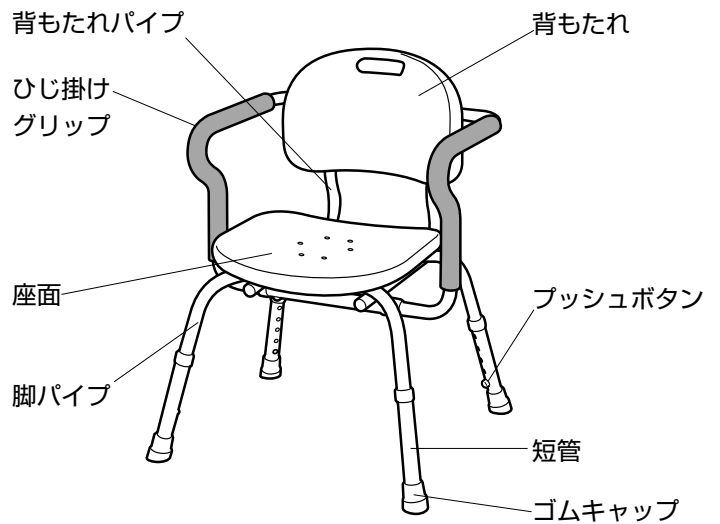

ひじ掛け付シャワーベンチRE-U/RE-Uワイド

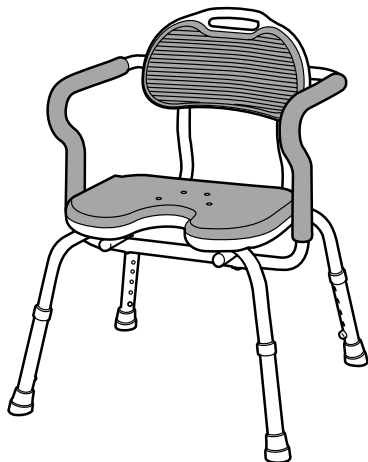

ひじ掛け付シャワーベンチRN-U

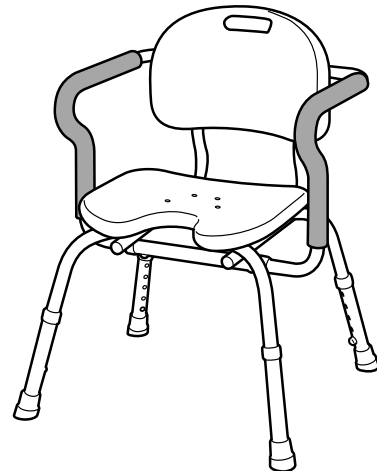

仕様

(RE-S/RE-U/RE-Sワイド/RE-Uワイド)

材 質	座面・背もたれ	ポリエチレン
	ソフトパッド	EVA樹脂
	ひじ掛けグリップ	合成ゴム
	ゴムキャップ	
	ネジ類	ステンレス
	パイプ	アルミニウム
サイズ	●RE-S/RE-U 幅55×奥行50×高さ69～79cm	
	●RE-Sワイド/RE-Uワイド 幅58×奥行51.5×高さ69～79cm	
重 量	●RE-S/RE-U 約4.2kg	
	●RE-Sワイド/RE-Uワイド 約4.9kg	
座面までの高さ	34～44cm (5段階)	

(RN-S/RN-U)


材 質	座面・背もたれ	ポリエチレン
	ひじ掛けグリップ	合成ゴム
	ゴムキャップ	
	ネジ類	ステンレス
	パイプ	アルミニウム
サイズ	●RN-S/RN-U 幅55×奥行50×高さ67～77cm	
重 量	●RN-S/RN-U 約4kg	
座面までの高さ	34～44cm (5段階)	

使いかた


注意 使用前にすべてのネジがゆるんでいないか定期的に点検し、使用すること
ネジがゆるんでいると、転倒し、けがの原因になります。プラスドライバーでネジを増し締めしてください。

ひじ掛けの使いかた

- 「立ち座り」をサポート
立ち座り時にしっかり握って身体を支えることができます。

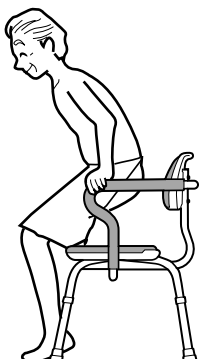


- 「座位」をサポート
着座時に上体を支え、「座位」をしっかりサポートします。

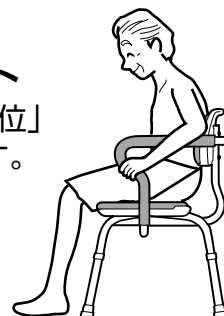


ひじ掛けの取り外しかた

- 1 取り外したい側のひじ掛けを固定しているネジ（座面側1本・背もたれ側1本）をプラスドライバーでゆるめ、取り外します。

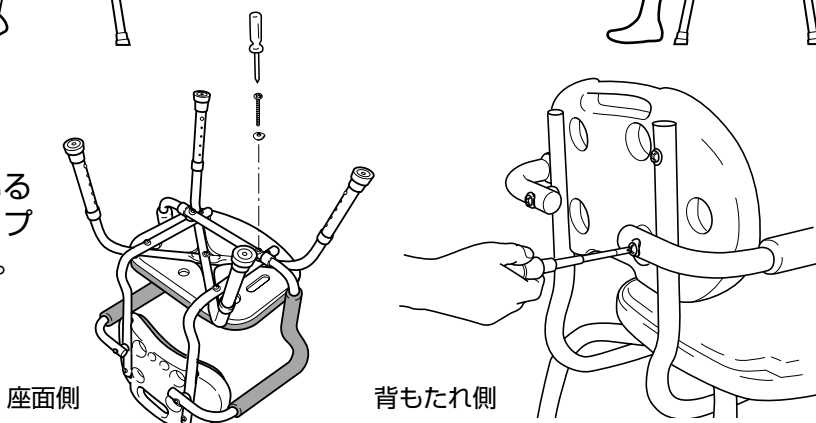

- 2 ひじ掛けを取り外した後、座面側のジョイントパイプを1で取り外したネジ1本で締め直します。（※背もたれパイプとジョイントパイプの間に、プラスチックジョイントを必ず挟んで固定してください。）

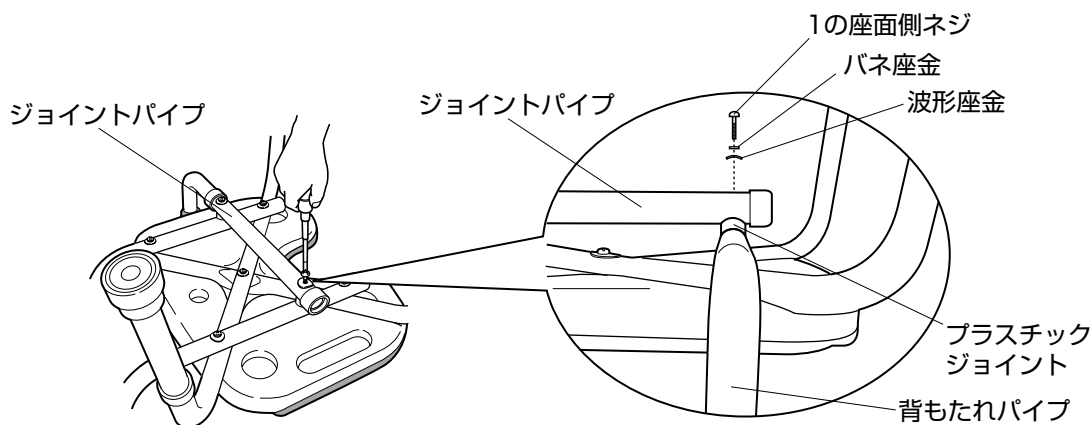

※上記作業で残った背もたれ側のネジ1本・座金類とプラスチックジョイント1個は大切に保管してください。


- ひじ掛けの両側を取り外す場合は、上記1・2の手順と同じ方法で行ってください。その際、ジョイントパイプも一緒に取り外してください。
- ひじ掛けを再度取り付ける場合
上記2でジョイントパイプを締め直したネジを取り外し、ひじ掛け末端を差し込んでから、ネジで座面側・背もたれ側をしっかり固定してください。（※ひじ掛けの固定の際、プラスチックジョイントやネジにバネ座金・波形座金をセットしているか必ず確認して作業してください。）

注意 ● ひじ掛けの取り付け・取り外しの際、ネジ・バネ座金・波形座金・プラスチックジョイントは正しく、しっかりと取り付けられているか、必ず確認すること
ネジがゆるみ、転倒し、けがの原因になります。
● ひじ掛けを取り外した側のジョイントパイプは、必ずネジでしっかりと固定すること
ひじ掛けがぐらつき、破損したり、転倒やけがの原因になります。

使いかた

移乗のしかた

浴槽側のひじ掛けを取り外すと、座位の姿勢で浴槽へ入る動作が行えます。
(※本体のガタツキがないようお風呂場の排水口等にご注意ください。)

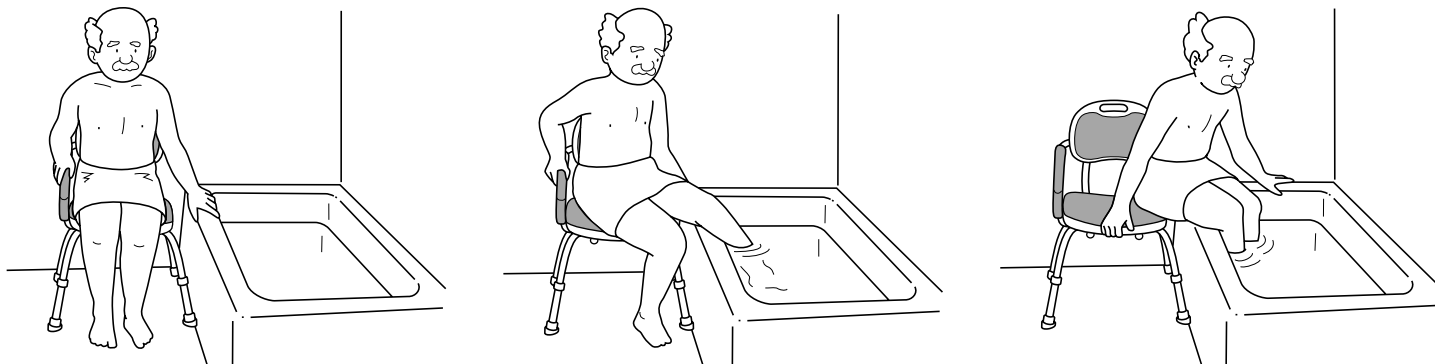

座面の高さ調節

座面の高さは5段階（約34～44cm）に調節できます。
※調節は、脚部にあるプッシュボタンを押しながら短管を引いてください。
プッシュボタンがカチッという音がして飛び出せば、セット完了です。

注意 4本の脚部がすべて同じ高さに設定されており、高さ調節用のプッシュボタンが確実に飛び出して固定されているか必ず確認すること
転倒し、けがの原因になります。



お手入れの方法


ソフトパッドの着脱方法（ソフトパッド付タイプの場合）

1 座面・背もたれソフトパッドの取り外し

座面・背もたれ裏面からソフトパッドの固定脚を押すと、ソフトパッドを取り外すことができます。

2 座面・背もたれソフトパッドの取り付け


ソフトパッド裏面に出ている固定脚を座面・背もたれの穴に合わせ、上からしっかり押えるだけで取り付けることができます。
(ソフトパッドの前後左右を間違えないように注意してください。)

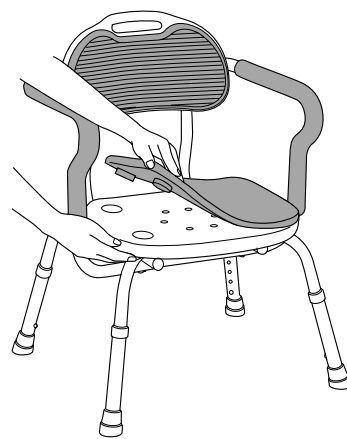

本体及びソフトパッドの洗浄（共通）

●中性洗剤のうすめ液をスポンジかやわらかい布にふくませ、汚れを取ったあと、きれいな水で洗剤を洗い流し、かげ干しか、乾いた布で空ぶきしてください。



注意 ※タワシや磨き粉、研磨剤入りのスポンジ等は使用しないこと
※塩素系洗剤・酸・アルカリ性洗剤・シンナー・クレゾール等は絶対に使用しないこと
プラスチックが劣化または破損し、けがの原因になります。

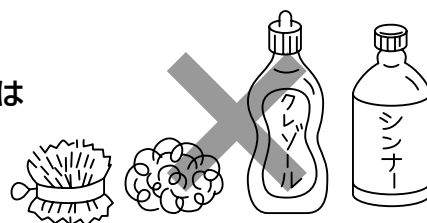


※座面・背もたれソフトパッドは消耗品ですので、汚れたり、破損した場合はお買い求めになられた販売店で新しいものをお取り寄せください。

ひじ掛け付シャワーベンチRE-S/RE-U/RE-Sワイド/RE-Uワイド


■サイズ (単位cm)

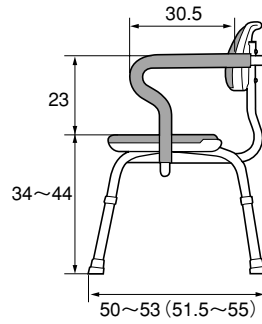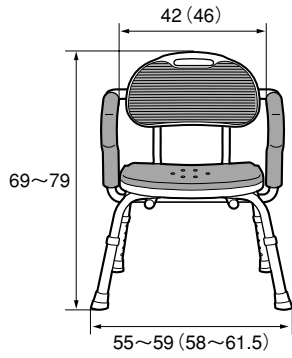

S座面

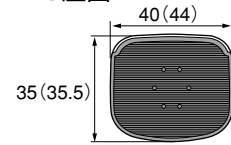



U座面

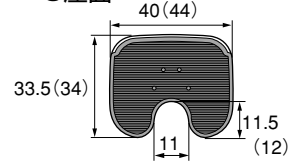


※ () 内はワイドの数値です。

ひじ掛け付シャワーベンチRN-S/RN-U

■サイズ (単位cm)

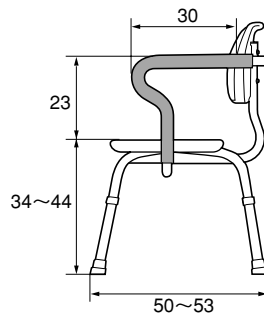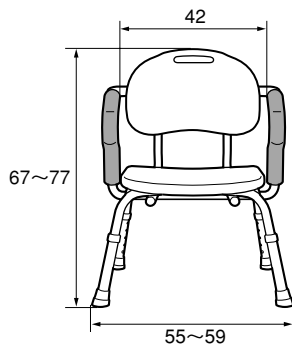

S座面

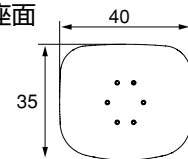

U座面

